

Mode d'emploi de votre **LifeVac** par



1. Choisissez la bonne taille de masque et jetez l'anneau en plastique coloré. Insérez le masque dans l'appareil en le tordant tout en appliquant une pression. Assurez-vous de vérifier que le masque est solidement fixé à l'unité.



2. Placez le masque sur votre nez et votre bouche, la bouche entrouverte et en gardant le menton relevé. Vous devez tenir fermement le masque avec votre main sur votre nez et votre bouche. Assurez-vous qu'aucun air ne pénètre à l'intérieur du masque.



3. Tout en maintenant le masque en place d'une main et en gardant le menton de la victime vers le haut, appuyez sur la poignée de l'autre main pour comprimer l'unité.



4. Une fois la poignée enfoncée, tirez la poignée rapidement tout en maintenant le masque fermement en place.



5. Placez la personne sur le côté et retirez les débris de la bouche. Vérifiez également la présence de débris sur l'unité. Répétez cette procédure si nécessaire.

EN CAS D'ABSENCE DE RESPIRATION SPONTANÉE, COMMENCEZ LA RCP (RÉANIMATION CARDIOPULMONAIRE) SELON LE PROTOCOLE DE BASE DE SOUTIEN À LA VIE.