

Procédure du test de montage de votre LifeVac par

IMPORTANT: vous devez tester votre appareil LifeVac et vous familiariser avec son fonctionnement afin de savoir comment utiliser le produit avant qu'une situation d'urgence ne survienne. De même, toutes les personnes susceptibles d'utiliser le produit doivent effectuer ce processus de test. Sachez que cela augmentera considérablement vos chances de succès en cas d'urgence.

Vous pouvez effectuer ces tests sur une surface plane telle qu'une table ou une surface molle comme votre jambe. Faites autant de tests que vous le jugez nécessaire pour vous sentir confiant dans le fonctionnement du produit.



1 Déballez un masque et retirez l'anneau en plastique coloré. Insérez le masque dans l'appareil en le tordant tout en appliquant une pression. Vérifiez que le masque est correctement et fermement fixé.



2 D'une main, fixez le masque et de l'autre main, abaissez la poignée. Vous entendrez un souffle d'air sortir de l'appareil.



3 Une fois complètement vidée, vous devez tirer la poignée rapidement vers le haut. Vous ressentirez le vide (pression négative) généré par l'unité LifeVac.



4 Une fois que vous vous êtes familiarisé avec l'unité LifeVac, retirez le masque en tirant et en tordant le masque tout en tenant la base de l'unité. Vous devez avoir du mal à retirer le masque. Dans un tel cas, le masque était correctement fixé. Rangez le masque.



5 Remplacez l'unité LifeVac, les masques et les instructions dans la boîte et stockez-les dans un endroit sûr, sec et accessible en cas d'urgence.